

## Garrot tourniquet express



### Codes produits :

Référence 620DRA030

EAN13 : 3700207847725

CUP : -

### Galerie de produits :



### Description du produit :

Garrot tourniquet express.

Ce garrot tourniquet est conçu pour la compression d'une blessure nécessitant une compression.

Ce dernier doit être posé **en amont de la blessure** et ne doit **jamais** être sur une articulation.

Serrer ensuite le garrot en **tirant fermement** sur la sangle.

Utilisez le système de pince et tourner la tige jusqu'à ce que le sang ne coule plus.

Enfin, insérer la tige dans les crochets rigides en plastiques et notifier l'heure sur l'étiquette.

### RECOMMANDATIONS :

- Un garrot ne doit pas être mis en place pendant plus de 2 heures.
- Seul un professionnel aguerri, de préférence un médecin, peut desserrer le garrot.
- Il est important d'allonger le blessé pour assurer à son sang une bonne circulation parmi ses organes vitaux.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Dispositif médical permettant de stopper une hémorragie.
- Emplacement pour l'heure de pose.
- 3,8 x 96 cm.
- Coloris noir.